

NOTICE D'UTILISATION
DU PILULIER *CAREOUSEL*® *Advance*



INTRODUCTION

Le distributeur automatique de médicaments Careousel® Advance rappelle à l'utilisateur quand prendre ses médicaments grâce à une alerte sonore et à une diode clignotante. Il délivre la dose correcte au bon moment du jour ou de la nuit, tout en conservant les autres pilules et gélules à l'abri du regard.

- ✓ Les médicaments sont distribués à partir d'un panier interne comportant 28 cases.
- ✓ Le nombre maximum d'alertes est égal à 24 déclenchements par jour.

Lorsque l'alerte sonne, le panier intérieur pivote. La dose adéquate apparaît alors dans l'orifice du couvercle.

Les médicaments doivent être retirés du pilulier en l'inclinant et en versant les pilules dans la main ou un récipient approprié.



Cette action neutralise le signal d'alerte et la diode clignotante.

- ✓ **Le Careousel® Advance dispose d'une fonction de sécurité brevetée qui réduit en outre le risque de prise de médicaments au mauvais moment.**

Ainsi, avec le mode « SECURE » activé, un volet de sécurité, à blocage automatique, scelle l'orifice du couvercle du Careousel® et empêche l'accès au médicament dans le compartiment visible, sauf au moment programmé pour la délivrance du médicament. Cela limite la possibilité de double dosage et interdit l'accès à la dose présente dans le compartiment sous l'orifice du couvercle, immédiatement après le remplissage du Careousel.

Lorsque le panier a été rempli de médicaments et lorsque le couvercle a été fermé, le verrouillage de sécurité du volet du compartiment, visible dans l'orifice du dessus du Careousel®, est activé et les médicaments sont rendus inaccessibles. Quand il est temps de prendre les médicaments, le panier tourne dans le sens des aiguilles d'une montre et les alertes sonore et lumineuse sont émises pour le rappeler à l'utilisateur. Le médicament peut ensuite être obtenu en retournant le Careousel. Le verrouillage du volet du compartiment est débloqué et le médicament est distribué dans la main ou un autre récipient approprié.

Lorsque le médicament a été pris par l'utilisateur et lorsque le Careousel® a été replacé à l'horizontale, le panier pivote d'un demi-compartiment et le verrouillage du volet est réactivé .

Si le médicament n'a pas été pris dans le délai programmé (compris entre 5 minutes et 5 heures) après le déclenchement des alertes, le verrouillage de sécurité est activé et les médicaments présents dans le compartiment sont alors rendus inaccessibles. Ceci élimine tout risque pour l'utilisateur de prendre une dose juste avant la prochaine dose programmée et, ce faisant, d'être victime d'un surdosage.

✓ **Les informations sont affichées sur un écran placé sur le couvercle.**

L'afficheur à cristaux liquides est visible même si le couvercle est fermé afin que l'utilisateur et l'aidant puissent connaître:

- x la date et l'heure;
- x le moment programmé pour la prochaine dose à prendre (date/heure);
- x le nombre de doses encore disponibles;
- x le niveau de charge des piles ou des batteries.

Toutes ces informations sont affichées lorsque le Careousel® est incliné vers l'avant.

Lorsque le Careousel® est placé dans une position horizontale, l'affichage indique seulement la date et l'heure.

Tandis que les alertes du Careousel® rappellent à l'utilisateur de prendre son médicament, l'écran affiche aussi "TAKE MED".

Quand il n'y a plus que 4 doses disponibles, l'écran affiche DOS 04. Puis, à chaque dose prise, il affiche successivement DOS 03, DOS 02, DOS 01 et enfin 00 DOS .

Lorsque la capacité des piles ou des batteries devient inférieure à 20%, le message LowBatt est affiché en alternance avec la date et l'heure.

La fonction d'affichage est particulièrement utile à l'aidant familial ou professionnel car il peut ainsi contrôler facilement l'état du Careousel sans avoir à l'ouvrir.

La boîte contient:

- ✓ 3 disques (imprimés et vierge) à adapter au nombre quotidien de prises de médicaments;
- ✓ 4 piles alcalines AA (déjà en place);
- ✓ Une clé de verrouillage (dans une case du panier intérieur);
- ✓ Une vis (dans une case du panier intérieur) pour sceller la trappe du compartiment des piles (voir pages 15 et 16);
- ✓ Ce mode d'emploi.

Caractéristiques techniques:

- ✓ Dimensions: Longueur 200 mm - Largeur 180 mm - Hauteur 56 mm
- ✓ Poids: 390 g sans les piles – 490 g avec les piles
- ✓ Volume des cases du panier: 11 ml par case
- ✓ Alimentation: 6 V (4 piles alcalines LR6 d'1,5 V ou 4 batteries AA rechargeables NiMH)
- ✓ Durée de vie des piles: > 1 an

UTILISATION DU PILULIER POUR LA PREMIÈRE FOIS

- Activez les piles:

Retournez le pilulier et soulevez la trappe du compartiment à piles situé sous l'appareil.
Retirez la bande protectrice rouge.



Le distributeur émet alors un double bip après quelques secondes.
Remettez en place la trappe.

- Ouvrez le couvercle:



Introduisez l'extrémité d'un index dans l'orifice du couvercle et appuyez sur la paroi avec le pouce.
Soulevez le couvercle.

REPLISSAGE DU PILULIER

1) Les disques

Trois disques sont fournis (un pack de trois disques est également commercialisé en accessoire):

- Deux disques imprimés pour 1 à 4 prises quotidiennes de médicaments (ils sont utilisables sur chaque face);
- Un disque vierge à personnaliser (en complétant à la main l'une des faces disponibles) pour un nombre quotidien de prises de médicaments supérieur à 4.

Placez le disque correspondant au nombre approprié de doses quotidiennes sur le dessus du panier: son positionnement est facilité par les quatre picots du carrousel qui doivent s'insérer dans les quatre trous du disque choisi.



2) Les médicaments (voir aussi la note à la page 17 sous la rubrique «Médicaments»)

Retirez le panier du pilulier.

Mettez la dose de médicaments correcte dans chaque case du panier.

Note: si une pilule est tombée par mégarde dans la mauvaise case, une pince à épiler peut être utile pour retirer facilement la pilule.

Si une case ne suffit pas pour accueillir tous les médicaments correspondant à une seule prise, il est possible de répartir ces médicaments dans deux cases contiguës en fixant la même heure de prise pour chacune d'elles.

Après le remplissage, installez le panier dans le pilulier en veillant à ce que la case contenant la première dose à délivrer soit placée à droite de l'ouverture et du mécanisme de verrouillage du pilulier.



Si le Careousel® Advance est réglé pour fonctionner en mode « SECURE » (voir les explications en page 11), appuyez sur le bouton 2 jusqu'à ce que « TRAY Z » soit affiché à l'écran. Le panier pivotera alors d'une demi-case pour atteindre la bonne position.

Fermez le couvercle du pilulier.

Au prochain déclenchement de l'alerte, le plateau tournera dans le sens des aiguilles d'une montre et mettra à disposition les médicaments.

3) Les paniers supplémentaires

Des paniers de rechange avec leur couvercle de protection, et des disques peuvent être achetés en accessoires: ils permettront d'effectuer à l'avance le remplissage des médicaments.

4) La carte des prescriptions (lorsqu'elle est fournie)

Cette carte peut être utile pour rappeler le détail des doses prescrites. Après l'avoir renseignée, glissez-la dans les encoches situées sous l'appareil, près du compartiment des piles.



PARAMÉTRAGE DU PILULIER

Celui-ci s'effectue à l'aide de trois boutons: le bouton 1 permet de naviguer d'une fonction à l'autre, alors que les boutons 2 et 3 sont utilisés pour modifier les paramètres de chaque fonction. Il y a deux menus pour les réglages:

Menu A: (Bouton 1)

CLOCK
DATE
DOSES
ALARMS

Menu B: (Bouton 3)

BEFORE AFTER SOUND LIGHT FILLED BATT
SECURE HOURS DLS START STOP RECORD

Note:

Après avoir effectué le paramétrage dans le menu A ou dans le menu B, appuyez sur le bouton 1 pendant trois secondes pour rétablir le fonctionnement normal. Si cela n'est pas fait lors d'un paramétrage dans le menu A, l'affichage retourne automatiquement au fonctionnement normal après 25 secondes; si cela n'est pas fait lors d'un paramétrage dans le menu B, l'affichage retourne automatiquement au fonctionnement normal après 5 minutes.

Menu A (accessible via le bouton 1)

Remarque: Pour assurer un fonctionnement correct, il est important de régler au préalable les fonctions CLOCK et DATE.

1) Réglage de l'heure (CLOCK):

a) Appuyez plusieurs fois sur le bouton 1 jusqu'à ce que « CLOCK » apparaisse sur l'écran.



b) Entrez l'heure correcte en appuyant sur les boutons 2 ou 3. Vous pouvez avancer l'heure ou la retarder en pressant et en maintenant enfoncée l'une de ces touches.

2) Réglage de la date (DATE):

a) Appuyez sur le bouton 1 jusqu'à ce que « DATE » soit visible sur l'écran; attendez quelques secondes que « YY » s'affiche.



b) Utilisez les boutons 2 et 3 pour régler l'année (YY) puis appuyez sur le bouton 1.

c) Utilisez les boutons 2 et 3 pour régler le mois (MM) puis appuyez sur le bouton 1.

d) Utilisez les boutons 2 et 3 pour régler le jour (DD) puis appuyez sur le bouton 1.

3) Réglage du nombre de prises par jour (DOSES):

a) Appuyez sur le bouton 1 jusqu'à ce que « DOSES » soit visible sur l'écran; attendez quelques

secondes que « 00 » ou « 01 » ou « 02 » (etc.) s'affiche.



b) A l'aide des boutons 2 et 3, entrez le nombre correct de prises par jour puis appuyez sur le bouton 1.

4) Réglage des heures d'alerte (ALARMS):

a) Appuyez sur le bouton 1 à plusieurs reprises jusqu'à ce que « ALARMS » soit indiqué sur l'écran; attendez quelques secondes que l'heure de la première alerte s'affiche.



b) Réglez la première alerte (1) en utilisant les boutons 2 ou 3.

c) Appuyez une nouvelle fois sur le bouton 1 pour régler la seconde alerte (2) et, le cas échéant, répétez la procédure pour les autres alertes ultérieures (un maximum de 24 alertes quotidiennes est possible).

d) Ensuite, appuyez encore une fois sur le bouton 1, en le maintenant enfoncé pendant quelques secondes, pour quitter le menu et revenir au fonctionnement normal.

Menu B (accessible via le bouton 3)

Pour accéder aux fonctions de ce menu, appuyez sur le bouton 3 et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que « BEFORE » soit affiché sur l'écran. Les autres fonctions sont accessibles en appuyant sur le bouton 1 à plusieurs reprises.

1) BEFORE: Prendre un médicament avant l'heure d'alerte pré-réglée

L'accès aux médicaments peut être autorisé un peu plus tôt que l'heure d'alerte programmée (jusqu'à 5 heures avant). Lorsque la fonction BEFORE est sélectionnée, le réglage s'effectue en appuyant sur les boutons 2 et 3 pour définir le délai nécessaire. Pendant le délai défini, il est possible à l'utilisateur d'accéder plus tôt au(x) médicament(s) en faisant pivoter le pilulier et en le redressant deux fois de suite; dans ce cas de prise avancée, le pilulier se met en veille jusqu'à la prochaine distribution de médicament(s) programmée.

Si cette fonction n'est pas nécessaire, laissez le réglage à « 00:00 ».

Note: Si l'utilisateur est aisément désorienté, nous recommandons de ne pas activer cette fonction.

NB: Si un médicament est pris avant l'heure normale, le pilulier ne se remettra à pivoter qu'à l'heure de la prise de médicaments suivante.

2) AFTER

Il est possible de programmer la durée pendant laquelle l'alerte sonore va retentir, la diode clignoter, et le volet de sécurité rester déverrouillé, à l'heure de la prise des médicaments, tant que ceux-ci n'auront pas été retirés du pilulier.

Lorsque cette fonction est activée, l'alerte sonore retentit et la diode clignote toutes les 5 secondes pendant la première minute, puis toutes les 8 secondes jusqu'à 1 heure après leur déclenchement; dans le laps de temps compris entre 1 heure et 5 heures, l'alerte sonore est émise toutes les minutes et l'alerte visuelle toutes les 16 secondes.

Pour procéder au réglage:

a) Appuyez sur la touche 3 et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que « BEFORE » apparaisse. Puis appuyez sur le bouton 1 de façon répétée jusqu'à ce que « AFTER » soit affiché.

b) Sélectionnez la durée d'alerte requise en appuyant sur les boutons 2 et 3 (au minimum 5 minutes / au maximum 5 heures).

3) SOUND

Il y a quatre sons disponibles pour l'alerte.

Pour choisir la sonnerie:

a) Appuyez sur la touche 3 et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que « BEFORE » soit affiché. Appuyez plusieurs fois sur le bouton 1 jusqu'à ce que « SOUND » soit affiché.

b) Choisissez votre sonnerie préférée 01, 02, 03 ou 04 en appuyant sur les touches 2 ou 3. Si vous ne désirez aucune sonnerie, réglez à 00.

4) LIGHT

Le fonctionnement de la diode est paramétrable.

a) Appuyez sur la touche 3 et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que « BEFORE » soit affiché. Appuyez plusieurs fois sur le bouton 1 jusqu'à ce que « LIGHT » soit affiché.

b) Si la diode clignotante n'est pas nécessaire, appuyez une fois sur le bouton 2: « OFF » sera affiché. Si la diode clignotante est souhaitée, appuyez une fois sur le bouton 3: « ON » sera affiché.

5) FILLED

Lorsque cette fonction est activée, elle permet d'indiquer à l'appareil que les cases du panier ont été remplies afin d'obtenir ultérieurement le nombre de doses encore disponibles.

a) Appuyez sur la touche 3 et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que « BEFORE » soit affiché. Appuyez plusieurs fois sur le bouton 1 jusqu'à ce que « FILLED » soit affiché.

b) A l'aide des boutons 2 et 3, déterminez le nombre de doses qui ont été chargées dans le panier. Quand il ne restera plus aucune dose, l'écran affichera « - - - ».

6) BATT

Pour assurer l'alimentation électrique, vous pouvez utiliser, au choix, des piles alcalines ou des batteries NiMH rechargeables.

a) Appuyez sur la touche 3 et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que « BEFORE » soit affiché. Appuyez plusieurs fois sur le bouton 1 jusqu'à ce que « BATT » soit affiché.

b) A l'aide des boutons 2 et 3, indiquez votre choix en sélectionnant ALC pour les piles ou NIMH pour les batteries rechargeables.

7) SECURE

Ce réglage permet d'activer ou de désactiver le volet de sécurité sur l'orifice du couvercle.

Pour l'activer:

a) Appuyez sur la touche 3 et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que « BEFORE » soit affiché. Appuyez plusieurs fois sur le bouton 1 jusqu'à ce que « SECURE » soit affiché.



b) Appuyez alors sur le bouton 2.

Le volet de sécurité est ainsi toujours verrouillé, sauf lorsque les alertes indiquent qu'il est temps de prendre le(s) médicament(s) (cette période étant éventuellement prolongée du délai « AFTER »). Une fois que la dose a été récupérée, le volet de sécurité se verrouille de nouveau 25 secondes plus tard. Ce volet est également bloqué à l'issue du délai « AFTER » pour éviter à l'utilisateur de prendre deux doses dans un très court laps de temps.



Pour le désactiver:

a) Appuyez sur la touche 3 et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que « BEFORE » soit affiché. Appuyez plusieurs fois sur le bouton 1 jusqu'à ce que « SECURE » soit affiché.

b) Appuyez alors sur le bouton 3.

Dans cette configuration, le volet de sécurité n'est jamais verrouillé et le panier pivotera d'une case à l'heure programmée pour chaque prise de médicament(s).

8) HOURS (modes 24 heures / AM-PM de l'horloge)

Le pilulier est pré réglé pour afficher l'heure par cycles de 24 heures (mode recommandé pour éviter la confusion).

Pour passer au mode anglo-saxon AM-PM (cycles de 12 heures: AM de minuit à midi; PM de midi à minuit):

a) Appuyez sur la touche 3 et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que « BEFORE » soit affiché. Appuyez plusieurs fois sur le bouton 1 jusqu'à ce que « HOURS » soit affiché.

b) Choisissez AM/PM pour le mode AM-PM (ou 24HRS pour revenir à des cycles de 24 heures) en appuyant sur les boutons 2 ou 3.

9) DLS (Daylight Saving)

L'activation de cette fonction permet au pilulier de passer automatiquement à l'heure d'été.

a) Appuyez sur la touche 3 et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que « BEFORE » soit affiché. Appuyez plusieurs fois sur le bouton 1 jusqu'à ce que « DLS » apparaisse.

b) Utilisez les touches 2 et 3 pour afficher « EU » (si vous choisissez l'heure d'été européenne) ou « US » (si vous choisissez l'heure d'été américaine).

Si vous ne désirez pas utiliser cette fonction, sélectionnez « OFF ».

10) START

Il est possible de retarder le moment à partir duquel le pilulier va commencer à délivrer des médicaments. Cette fonction est utile lorsque le pilulier, par exemple, est rempli par une pharmacie et est rendu plus tard à son utilisateur.

Pour activer cette fonction:

a) Appuyez sur la touche 3 et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que « BEFORE » soit affiché. Appuyez plusieurs fois sur le bouton 1 jusqu'à ce que « START » apparaisse et attendez quelques secondes que « YY » s'affiche.

b) Commencez alors à programmer le moment de remise en service du pilulier en utilisant les boutons 2 et 3 pour régler l'année (YY) puis appuyez sur le bouton 1.

c) Utilisez les boutons 2 et 3 pour régler le mois (MM) puis appuyez sur le bouton 1.

d) Utilisez les boutons 2 et 3 pour régler le jour (DD) puis appuyez sur le bouton 1.

e) Utilisez les boutons 2 et 3 pour régler l'heure (HH) puis appuyez sur le bouton 1. L'heure de redémarrage doit être antérieure à celle de la première dose de médicament(s) à délivrer.

Si vous ne désirez pas utiliser cette fonction, n'effectuez pas le paramétrage « START ».

11) STOP

Il est aussi possible de programmer l'arrêt du Careousel® Advance à une date ultérieure. Cette fonction est utile lorsque deux piluliers ou davantage sont utilisés à la suite car elle garantit qu'un seul pilulier est actif à un moment donné.

Pour activer cette fonction:

a) Appuyez sur la touche 3 et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que « BEFORE » soit affiché. Appuyez plusieurs fois sur le bouton 1 jusqu'à ce que « STOP » apparaisse et attendez quelques secondes que « YY » s'affiche.

b) Commencez alors à programmer le moment de mise à l'arrêt du pilulier en utilisant les boutons 2 et 3 pour régler l'année (YY) puis appuyez sur le bouton 1.

c) Utilisez les boutons 2 et 3 pour régler le mois (MM) puis appuyez sur le bouton 1.

d) Utilisez les boutons 2 et 3 pour régler le jour (DD) puis appuyez sur le bouton 1.

e) Utilisez les boutons 2 et 3 pour régler l'heure (HH) puis appuyez sur le bouton 1. L'heure d'arrêt doit être postérieure à celle de la dernière dose de médicament(s) à délivrer.

Si vous ne désirez pas utiliser cette fonction, renseignez l'année (YY) en indiquant 99.

12) RECORD

Le pilulier enregistrera les heures auxquelles les médicaments ont réellement été retirés au cours des 28 dernières distributions.

a) Appuyez sur le bouton 3 jusqu'à ce que « BEFORE » soit affiché.

b) Appuyez sur le bouton 1 jusqu'à ce que « RECORD » apparaisse: l'heure précise à laquelle la dernière distribution de médicaments a eu lieu est affichée.

Appuyez sur les touches 2 ou 3 pour obtenir l'affichage des heures des précédentes distributions.

REMISE A NIVEAU DU NOMBRE DE DOSES RESTANTES AFFICHE A L'ECRAN

Chaque fois que le pilulier délivre des médicaments, le nombre de doses disponibles diminue d'une unité (voir description en page 3).

Quand le panier vient d'être rempli, il est donc important de réajuster le nombre de doses disponibles en tenant compte du nombre réel de cases du panier dans lesquelles les médicaments ont été déposés (voir la rubrique FILLED en page 11).

Placez le panier à l'intérieur du pilulier dans la bonne position (voir la photo en page 6) et appuyez sur le bouton 2 jusqu'à ce que « TRAY Z » soit affiché. Si le Careousel® Advance fonctionne en mode « SECURE », le panier avance alors d'une demi-case.

Fermez le couvercle.

Le nombre de doses restantes « DOSES LEFT » qui est affiché est maintenant identique à celui qui a été renseigné avec la fonction « FILLED ».

VERROUILLAGE

Le pilulier peut être verrouillé avec la clé fournie. Tournez la clé d'un quart de tour dans le sens des aiguilles d'une montre pour verrouiller le distributeur, et dans le sens inverse pour le déverrouiller.



Soyez conscient que la serrure est un élément simple conçu uniquement comme une barrière supplémentaire.

VIS DU COUVERCLE DU COMPARTIMENT À PILES



Une vis est fournie afin d'empêcher l'accès aux piles si cela s'avère nécessaire. Placez la vis dans le trou du clip de fixation du couvercle du compartiment à piles et serrez-la.

La vis doit être retirée lorsque les piles sont à remplacer. Elle doit être ensuite remise en place.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Test

Le pilulier dispose d'une fonction de test.

Pour tester la rotation du panier et les alertes sonore et visuelle, appuyez simultanément sur les boutons 1, 2 et 3 en les maintenant enfoncés jusqu'à ce que « TEST » soit affiché.

Appuyez sur le bouton 1 pour vérifier le fonctionnement de la diode clignotante.

Appuyez sur le bouton 3 pour démarrer une séquence complète d'alertes:

a) L'écran affiche « DEMO », le panier avance d'une demi-case sous l'orifice du couvercle, l'alarme retentit et la diode clignote.

b) Le message « TAKE MED » (« PRENDRE LES MEDICAMENTS ») apparaît pendant 20 secondes.

c) Saisissez le pilulier et retournez-le pour une démonstration de la délivrance d'une dose; après cela, le message « CLOSE » est affiché et le panier avance d'une demi-case sous le couvercle.

d) Si le pilulier n'est pas manipulé au moment des alertes, le message « CLOSE » apparaît après 20 secondes et le panier avance d'une demi-case en position verrouillée.

Appuyez sur le bouton 1 et maintenez-le enfoncé pour quitter la fonction TEST.

Problèmes et solutions:

- Le panier ne pivote pas:

La sonnerie retentira de façon continue si le pilulier ne pivote pas correctement. Ce problème peut être dû, par exemple, à une obstruction entre le corps du pilulier et le panier. Dans ce cas, l'écran affichera « ERROR 01 » ou « ERROR 04 » ou « ERROR 08 ».

Appuyez une fois sur la touche 3 pour effacer le message d'erreur. Tout corps étranger à l'origine de l'obstruction doit être enlevé.

- Le pilulier est posé à l'envers:

Si le distributeur est à l'envers lorsque l'alerte de prise de médicaments se produit, l'alerte retentira bien mais le panier restera immobile. Le panier intérieur ne se remettra à pivoter que lorsque le pilulier aura été remis à l'endroit. Si plus d'un déclenchement d'alertes a eu lieu depuis le moment où le pilulier était à l'envers, le Careousel® Advance, une fois redressé, délivrera la dose correspondant au moment présent (les doses ratées sont placées hors de vue et de portée, sous le couvercle).

Médicaments:

Il existe des pilules qui ne doivent pas être exposées à l'air; par conséquent, elles ne doivent pas être placées dans le pilulier. En cas de doute, veuillez vérifier auprès de votre pharmacien.

Piles:

Un jeu de 4 piles alcalines AA LR6 est fourni avec votre nouveau pilulier. En utilisation normale, les piles ont une durée de vie d'au moins 12 mois.

La charge des piles peut être vérifiée en penchant le pilulier vers l'avant:

- ✓ A pleine charge, une capacité de 100% sera affichée à l'écran.
- ✓ A moins de 20%, le témoin de piles faibles « LOWBATT » s'enclenchera.
- ✓ A 0% le pilulier cessera de fonctionner. « ERROR 10 » apparaîtra à l'écran.

Au lieu des piles, vous pouvez aussi utiliser des batteries rechargeables: pour cela, assurez-vous que la fonction BATT du Menu B (voir page 11) est bien réglée sur NIMH.

Lorsque vous changez les piles, veillez à ce qu'elles soient installées correctement (voir les repères dans le compartiment à piles).

Nettoyage:

- ✓ Pilulier: essayez-le avec un chiffon humide.
- ✓ Panier intérieur: il peut être lavé à l'eau chaude ou dans un lave-vaisselle (à une température maximale de 70°C).

INTERFACES

Le pilulier comporte:

- ✓ Une interface interne qui permet de lui connecter divers appareils électroniques tels que, par exemple, un émetteur sans fil, un modem, une alarme sonore, une alarme lumineuse...
- ✓ Une interface externe placée au dessus du Careousel® et à gauche de l'écran. Elle est notamment prévue pour les mises à jour du logiciel. Elle sert aussi à surveiller l'état du pilulier et à contrôler les données enregistrées qui sont relatives aux moments auxquels les médicaments ont été effectivement pris par l'utilisateur.

IMPORTANT

POUR ÉVITER D'ENDOMMAGER LE MÉCANISME DU PILULIER, IL NE FAUT PAS FAIRE PIVOTER MANUELLEMENT LE PANIER LORSQUE CELUI-CI EST À L'INTÉRIEUR DE L'APPAREIL. POUR REPOSITIONNER LE PANIER, EXTRAYEZ-LE TOUJOURS ET REMETTEZ-LE À LA BONNE POSITION EN LE REPOSANT À L'INTÉRIEUR DU PILULIER.

Responsabilité de l'utilisateur:

Le distributeur automatique de médicaments Careousel® est une aide pour ceux qui ont des difficultés à se souvenir de prendre leurs médicaments.

C'est la responsabilité de l'utilisateur de prendre ses médicaments au moment opportun.

PharmaCell AB n'acceptera aucune responsabilité quant aux conséquences éventuelles d'une mauvaise observance par l'utilisateur du traitement qui lui a été prescrit.

Garantie:

PharmaCell AB garantit le distributeur automatique de médicaments Careousel® pendant les 24 mois suivant la date d'achat. La garantie donnera lieu à la réparation ou, au choix de PharmaCell, au remplacement du pilulier Careousel® ou de tout composant, autre que les piles, qui aura été identifié

comme étant défectueux. Un produit acheté depuis plus de 28 jours pourra être remplacé par un produit remis à neuf ou réparé.

Cette garantie ne couvre pas les défauts résultant d'accidents (tels que chute, immersion), d'une mauvaise utilisation (par exemple, introduction d'objets, rotation forcée du panier, ou ouverture forcée du pilulier), de l'usure normale, de la négligence, ou de toute tentative de réparation autre que par le biais de votre revendeur.

PharmaCell AB
Carlsundsgatan 1A
591 60 Motala, Suède
www.pharmacell.se

info@pharmacell.se

+46 141 21 21 65

A.S. 2.02